

Bederní pás

100G

Bederní pás. Výška: 26 cm nebo 32 cm



HANDICAP

Název zdravotnického prostředku

Bederní pás 100G

URČENÝ ÚČEL

Bederní pás 100G je určen ke zpevnění trupu při přetížení nebo při poúrazových a pooperačních stavech v oblasti bederní páteře.

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Elastický materiál zvyšuje bazální tonus břišní stěny a zpevňuje/odlehčuje bederní oblast pomocí přiložených výztuh.

INDIKACE

Přetížení trupu veškeré etiologie.

KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

ZBYTKOVÉ RIZIKO

Není známo.

MATERIÁL

Polyester (PES) 34%, polyamid (PAD) 34%, Linel 26%, bavlna 6%.

CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Dospělá populace s uvedenou indikací.




UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Nepřikládejte pomůcku přímo na otevřené rány nebo poškozenou pokožku.
- První nasazení pomůcky by mělo být provedeno za asistence odborníka.
- Správné nasazení je velmi důležité pro funkci pomůcky.
- Nadměrné utažení může negativně ovlivnit prokrvení.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Velikost je uvedena na balení.

LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.



Zdravotnický prostředek **MD** je určen pro jednoho pacienta . Skladujte na suchém místě , chráněném před přímým slunečním zářením .




Handicap, a. s.
Benešov 71, 679 53
Czech Republic

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.


Datum poslední revize: 1.2. 2020

POKYNY K NASAZENÍ


První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka

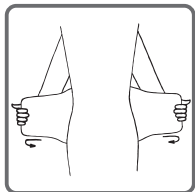

- 1** Obtočte bederní pás kolem pasu, přidržte na bříše levou stranu ortézy a dotáhněte pravou stranu.

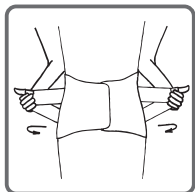

- 2** Zapněte výrobek a uchopte přidavné elastické tahy.

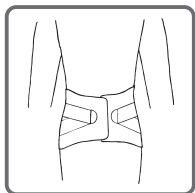

- 3** Přilepte pomocí suchých zipů vepředu na bříše, spodní okraj pásu by měl být umístěn přesně nad tříslu.

Před praním zapněte suché zipy.

Výrobek perte nejlépe v ruce nebo v pračce na šetrný program při teplotě 30°.


Výrobek pečlivě vymáchejte, zbytky pracího prostředku můžou způsobit podráždění kůže a vést k rychlejšímu opotřebení materiálu.




HANDICAP, A. S.

NEJVĚŠTÍ ČESKÝ VÝROBCE A EXPORTÉR
ORTOPEDICKÝCH POMŮCEK
NA NÁROČNÉ TRHY EVROPSKÉ UNIE

*Kvalita produkce, neustálý vývoj, zdokonalování výrobních procesů,
proracovaná výstupní kontrola, vstřícný přístup k zákazníkům.*

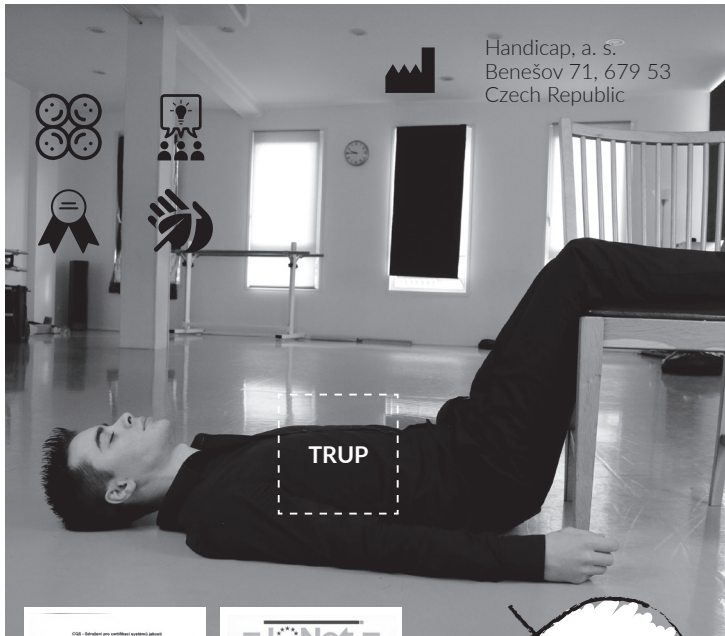

Handicap, a. s.
Benešov 71, 679 53
Czech Republic

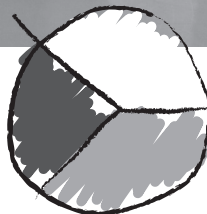

ČESKÝ VÝROBEK