

CE



Infrapatelární  
páska  
**102**



HANDICAP

# Infrapatelární páska 102

## URČENÝ ÚČEL

Infrapatelární páska 102 je určena k fixaci a kompresi ligamentum patellae při onemocnění, přetížení nebo poranění.

## VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Tlakem na ligamentum patellae umožňuje zatížení nepostiženého místa chrupavky.

## INDIKACE

Patelofemorální obtíže chondropatické etiologie.

## KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

## ZBYTKOVÉ RIZIKO

Není známo.

## MATERIÁL

4 mm chloropren (neopren) (80%)  
+ polyamid (PAD) 10% + polyethylen (PE) 10%.

## CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Dospělá populace s uvedenou indikací.




## UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Nepřikládejte pomůcku přímo na otevřené rány nebo poškozenou pokožku.
- První nasazení pomůcky by mělo být provedeno za asistence odborníka.
- Správné nasazení je velmi důležité pro funkci pomůcky.
- Nadměrné utažení může negativně ovlivnit prokrvení.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Velikost je uvedena na balení.

## LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.




Zdravotnický prostředek **MD** je určen pro jednoho pacienta . Skladujte na suchém místě , chráněném před přímým slunečním zářením .



Handicap, a. s.  
Benešov 71, 679 53  
Czech Republic


# POKYNY K NASAZENÍ

První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka

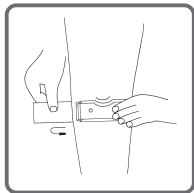


**1**

Přiložte pásku výřezem těsně pod patelu. Přidržte ve správné poloze.

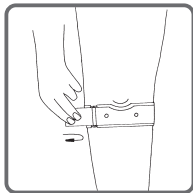

**2**

Provléčte poutkem pásek, dotáhněte a zapněte suchý zip.

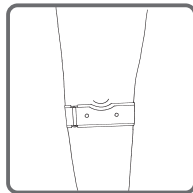

**3**

Zkontrolujte nasazení a kompresi.

*Před praním zapněte suché zipy.*

*Výrobek perťe nejlépe v ruce nebo v pračce na šetrný program při teplotě 30°.*

*Výrobek pečlivě vymáchejte, zbytky pracího prostředku mohou způsobit podráždění kůže a vést k rychlejšímu opotřebení materiálu.*



# HANDICAP, A. S.

NEJVĚTŠÍ ČESKÝ VÝROBCE A EXPORTÉR  
ORTOPEDICKÝCH POMŮCEK  
NA NÁROČNÉ TRHY EVROPSKÉ UNIE

*Kvalita produkce, neustálý vývoj, zdokonalování výrobních procesů,  
propracovaná výstupní kontrola, vstřícný přístup k zákazníkům.*



Handicap, a. s.  
Benešov 71, 679 53  
Czech Republic

DOLNÍ KONČETINY



ČESKÝ VÝROBEK