

CE



Krční límec  
**032C**



HANDICAP

## Krční límec 032C

### URČENÝ ÚČEL

Krční límec 032C je určen k fixaci krční a šíjové oblasti při pooperačních a poúrazových stavech či onemocněních v oblasti krku a šíje.

### VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Udržuje mírnou až semirigidní fixaci v oblasti krku a šíje.

### INDIKACE

- Lehké distorze krční páteře
- Doléčení po těžkých distorzích, operacích a frakturách po sejmutí rigidnější fixace
- Bolestivé stavy (např. degenerativní stavy)

### KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

### ZBYTKOVÉ RIZIKO

Není známo.

### MATERIÁL

Polystyrenové (PS) kuličky 60% + bavlněný úplet 40%.

### ČÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Dospělá populace s uvedenou indikací.




### UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Nepřikládejte pomůcku přímo na otevřenou ránu nebo poškozenou pokožku.
- První nasazení pomůcky by mělo být provedeno za asistence odborníka.
- Správné nasazení je velmi důležité pro funkci pomůcky.
- Nadměrné utažení může negativně ovlivnit prokrvení.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Velikost je uvedena na balení.

### LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.

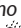

Zdravotnický prostředek **MD** je určen pro jednoho pacienta . Skladujte na suchém místě , chráněném před přímým slunečním zářením .



HANDICAP, a.s.  
Benešov 71, 679 53  
Czech Republic

# POKYNY K NASAZENÍ

První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka



**1**

Obtočte límeček kolem krku dle anatomického tvarování.



**2**

Zapněte suchý zip.

*Před praním zapněte suché zipy. Výrobek perte nejlépe v ruce.*


*Výrobek pečlivě vymáchejte, zbytky pracího prostředku mohou způsobit podráždění kůže a vést k rychlejšímu opotřebení materiálu.*



# HANDICAP, a.s.

## NEJVĚŠTÍ ČESKÝ VÝROBCE A EXPORTÉR ORTOPEDICKÝCH POMŮCEK NA NÁROČNÉ TRHY EVROPSKÉ UNIE

*Kvalita produkce, neustálý vývoj, zdokonalování výrobních procesů,  
propracovaná výstupní kontrola, vstřícný přístup k zákazníkům.*

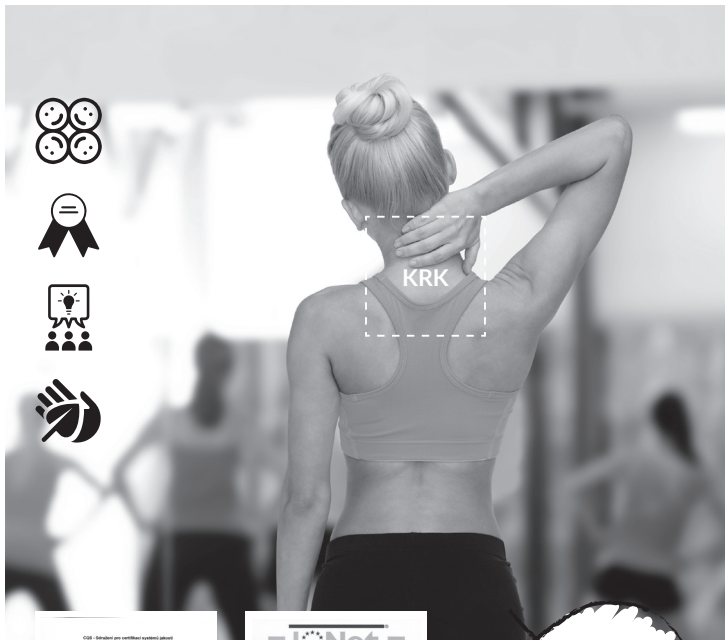

**ČESKÝ VÝROBEK**