

CE



Krční límec
032B



HANDICAP

Krční límec 032B

URČENÝ ÚČEL

Krční límec 032B je určen k fixaci krční a šíjové oblasti při pooperačních a poúrazových stavech či onemocněních v oblasti krku a šíje.

VLASTNOSTI Z HLEDISKA

ÚČINNOSTI

Udržuje mírnou až semirigidní fixaci v oblasti krku a šíje.

INDIKACE

- Lehké distorze krční páteře
- Doléčení po těžkých distorzích, operacích a frakturách po sejmutí rigidnější fixace
- Bolestivé stavy (např. degenerativní stavy)

KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

ZBYTKOVÉ RIZIKO

Není známo.

MATERIÁL

Polyuretanová (PUR) pěna 70% + bavlněný úplet 20% + polyethylenová (PE) výztuha 10%.

CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Dospělá populace s uvedenou indikací.




UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Nepřikládejte pomůcku přímo na otevřené rány nebo poškozenou pokožku.
- První nasazení pomůcky by mělo být provedeno za asistence odborníka.
- Správné nasazení je velmi důležité pro funkci pomůcky.
- Nadměrné utažení může negativně ovlivnit prokrvení.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Velikost je uvedena na balení.

LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.



Zdravotnický prostředek **MD** je určen pro jednoho pacienta . Skladujte na suchém místě , chráněném před přímým slunečním zářením .



HANDICAP, a.s.
Benešov 71, 679 53
Czech Republic

Datum poslední revize: 1.2. 2020

POKYNY K NAsAZENÍ

První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka



1

Obtočte límeček kolem krku dle anatomického tvarování.



2

Zapněte suchý zip.

Před praním zapněte suché zipy.

Výrobek perte nejlépe v ruce nebo v pračce na šetrný program při teplotě 30°.


Výrobek pečlivě vymáchejte, zbytky pracího prostředku mohou způsobit podráždění kůže a vést k rychlejšímu opotřebení materiálu.



HANDICAP, a.s.

NEJVĚŠTÍ ČESKÝ VÝROBCE A EXPORTÉR ORTOPEDICKÝCH POMŮCEK NA NÁROČNÉ TRHY EVROPSKÉ UNIE

*Kvalita produkce, neustálý vývoj, zdokonalování výrobních procesů,
propracovaná výstupní kontrola, vstřícný přístup k zákazníkům.*

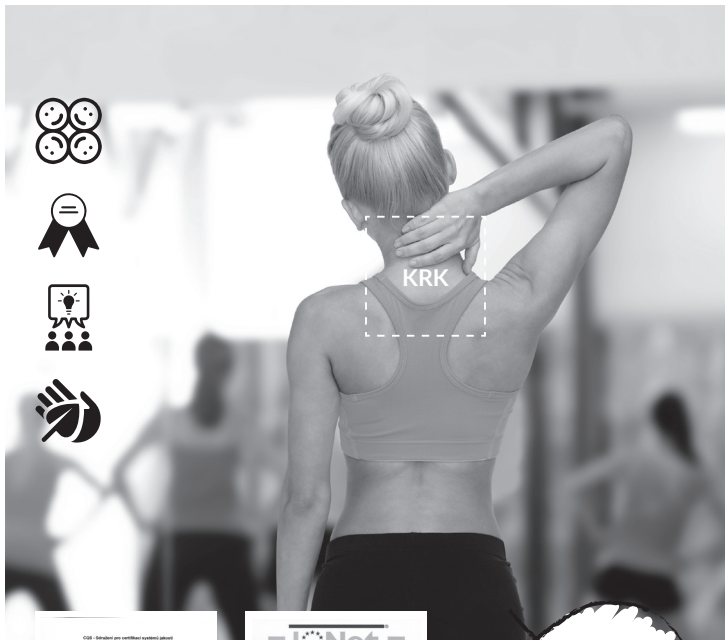

ČESKÝ VÝROBEK