

SWING®

ENERGIA PER LE TUE GAMBE



CZ NÁVOD K POUŽITÍ

Punčochy medi SWING® si nasadte hned, jak ráno vstanete.

Dávejte pozor na ostré nehty a prsteny!

Zacházejte s punčochami opatrně, abyste nepoškodili jejich jemnou pleteninu.

Při navlékání punčoch byste měli ideálně používat gumové rukavice.

1. Nahrňte délku punčochy do rukou až po chodidlovou část.

Vložte nohu dovnitř a zkontrolujte, zda je pata ve správné poloze.

2. Rozložte nyní punčochu rovnoměrně nahoru po lýtku, dokud správně nepadne.

3. Nyní zkontrolujte, zda je punčocha správně umístěna.

SLOŽENÍ

Polyamid (PA), Elastan (EA), Bavlna (CO), Vlna (WO)



Ruční praní



Nežehlit



Nebělit



Nečistit chemicky



Nesušit v bubnové sušice

V případě jakékoliv reklamace týkající se tohoto zdravotnického prostředku si prosím uschovejte číslo šarže na tomto obalu.

MEDI SWING® ELEGANTNÍ PODPŮRNÉ PUNČOCHY

Punčochové kalhoty a punčochy medi SWING® kombinují průhlednost a eleganci s funkcí modelování postavy pro vždy zdravé a krásné nohy. Produkty medi SWING® svým terapeutickým působením zmírňují pocity unavených, těžkých a oteklých nohou. Řada medi SWING® má mnoho atraktivních variant a vysoce módních barev, které nezklamou pozornost nejnáročnějších zákazníků.

MD CE

SWING®

ENERGIA PER LE TUE GAMBE



SK NÁVOD K POUŽITIU

Pančuchy medi SWING® si nasadte hneď, ako ráno vstanete.

Dávajte pozor na ostré nechty a prstene!

Zaochádzajte s pančuchami opatrne, aby ste nepoškodili ich jemnú pleteninu.

Pri navliekaní pančúch by ste mali ideálne používať gumové rukavice.

1. Nahrňte dĺžku pančuchy do rúk až po chodidlovú časť.

Vložte nohu do vnútra a skontrolujte, či je päta v správnej polohe.

2. Teraz rovnomerne rozložte pančuchu nahor cez koleno a potom cez stehno, dokým správne nepadne.

3. Teraz skontrolujte, či je pančucha správne umiestnená.

ZLOŽENIE

Polyamid (PA), Elastan (EA), Bavlna (CO), Vlna (WO)



Ručné pranie



Nežehliť



Nebieliť



Nečistiť chemicky



Nesušiť v bubnovej sušičke

V prípade akejkoľvek reklamácie týkajúcej sa tohto zdravotníckeho prostriedku si prosím uschovajte číslo šarže na tomto obale.

MEDI SWING® ELEGANTNÉ PODPORNÉ PANČUCHY

Pančuchové nohavice a pančuchy medi SWING® kombinujú priehľadnosť a eleganciu s funkciou modelovania postavy pre vždy zdravé a krásne nohy. Produkty medi SWING® svojim terapeutickým pôsobením zmiernujú pocity unavených, ťažkých a opuchnutých nôh. Rada medi SWING® má množstvo atraktívnych variánt a vysoko módných farieb, ktoré nesklamú pozornosť najnáročnejších zákazníkov.

MD CE