

prací pytlík medi - návod k použití

Jemná péče o kompresivní punčochy

Kompresivní punčochy jsou zdravotnickou pomůckou. Vyžadují velmi jemné zacházení, aby se zabránilo poškození struktury jejich vláken a aby se zajistilo, že zůstanou při nošení poddajné a pružné.

Prací pytlík medi se svou speciální síťovinovou strukturou ochraňuje pleteninu před vnějším poškozením a zároveň zajišťuje optimální vyprání od nečistot.

Instrukce pro správné praní kompresivních punčoch:

- Své kompresivní punčochy perte každý den.
 - Kompresivní punčochy můžete prát v pračce dle symbolů ošetřování uvedených na etiketě produktu s využitím šetrného pracího programu.
 - Při praní používejte pouze šetrné prací prostředky.
 - Nepoužívejte aviváž, protože vlákna by ztratila svou pružnost.
 - Nikdy nesušte kompresivní punčochy na slunci nebo na radiátoru.
 - Nečistěte prosím kompresivní punčochy chemicky, nežehlete je a nepoužívejte bělidlo.
-

Kompresivní punčochy ztrácejí i při nejšetrnější péči postupně svou elasticitu, a tím pádem i svůj účinek. Doba použitelnosti kompresivních punčoch je 6 měsíců. Po uplynutí této doby byste si měli pořídit nový kompresivní výrobek.