

CE



Ortýza zapěstí  
**045A**



**HANDICAP**

## Ortéza zápěstí 045A

### URČENÝ ÚČEL

Ortéza zápěstí 045A je určena k fixaci zápěstí ve středním postavení při pooperačních a poúrazových stavech či onemocněních v oblasti zápěstí.

### VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Udržuje semirigidní fixaci v oblasti distálního předloktí a karpu za pomoci rigidní tvarovatelné dlahy a bočních výtuh.

### INDIKACE

- Lehké distorze zápěstí.
- Doléčení zlomenin po sejmutí rigidní fixace.
- Bolestivé stavy spojené s artrózou, artritidou či tendinitidou.

### KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

### ZBYTKOVÉ RIZIKO

Není známo.

### MATERIÁL

Polyester (PES) 100%.

### CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Dospělá populace s uvedenou indikací.




### UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Nepřikládejte pomůcku přímo na otevřené rány nebo poškozenou pokožku.
- První nasazení pomůcky by mělo být provedeno za asistence odborníka.
- Správné nasazení je velmi důležité pro funkci pomůcky.
- Nadměrné utažení může negativně ovlivnit prokrvení.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Velikost je uvedena na balení.

### LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.



Zdravotnický prostředek **MD** je určen pro jednoho pacienta . Skladujte na suchém místě , chráněném před přímým slunečním zářením .




Handicap, a. s.  
Benešov 71, 679 53  
Czech Republic

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.

Datum poslední revize: 1.2. 2020


# POKYNY K NASAZENÍ

První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka

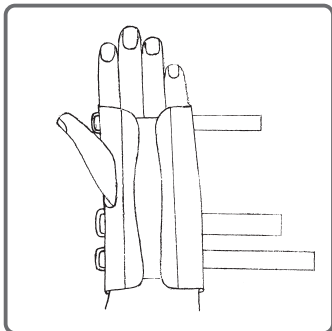

**1**

Rozeptejte všechny pásy. Duralová dlahu může být tvarována dle potřeby odborným personálem. Vsuňte postiženou ruku do ortézy.

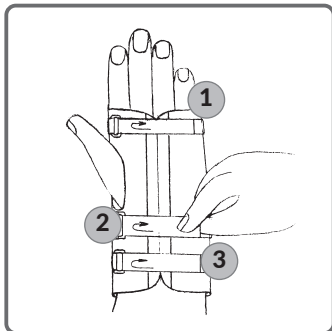

**2**

Zapněte pásy a regulujte dotažení.

Před praním zapněte suché zipy a vyjměte fixační dlahu.

Výrobek perte nejlépe v ruce nebo v pračce na šetrný program při teplotě 30°.

Výrobek pečlivě vymáchejte, zbytky pracího prostředku můžou způsobit podráždění kůže a vést k rychlejšímu opotřebení materiálu.



# HANDICAP, A. S.

NEJVĚŠÍ ČESKÝ VÝROBCE A EXPORTÉR  
ORTOPEDICKÝCH POMŮCEK  
NA NÁROČNÉ TRHY EVROPSKÉ UNIE

*Kvalita produkce, neustálý vývoj, zdokonalování výrobních procesů,  
propracovaná výstupní kontrola, vstřícný přístup k zákazníkům.*



Handicap, a. s.  
Benešov 71, 679 53  
Czech Republic



HORNÍ KONČETINY



ČESKÝ VÝROBEK